

## Käyttöohje

### Satisfyer Men – Cooling -liukasteaine

#### Satisfyer Men -liukasteaineet

Satisfyer Men -liukasteaineet ovat lääkinnällisiä tuotteita, joita käytetään iholla. Aineet on valmistettu öljyttömästi ja rasvatomasti. Niiden valikoidut raaka-aineet, kontrolloidut valmistusmenetelmät ja laajat testaukset takaavat liukasteaineiden korkean laadun. Liukasteaineet on testattu iholle ja limakalvoille sopiviksi ja niitä voi todistettavasti käyttää kondomien kanssa. Kaikki Satisfyer Men -sarjan liukasteaineet täyttävät eurooppalaisen lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY tiukat määräykset. Satisfyer Men -liukasteaineet ovat vesipohjaisia. Näin ne on helppo pestä vedellä pois kokonaan ilman jäämiä tai tahmeuden tunnetta iholla. Liukasteaineet sopivat erinomaisesti kaikkien Satisfyer Men -tuotteiden kanssa käytettäväksi, mutta niitä voi käyttää myös muiden seksilelujen kanssa sekä yhdynnän aikana.

#### Liukasteaineen vaikutus

Liukasteaineiden ansiosta Satisfyer Men -laitteen käyttö on yksinkertaista ja kiitaton. Aineet vaikuttavat kuten voiteluaine, jonka ansiosta voit työntyä nopeasti pehmeään suosaan ja nauttia seksilelun käytöstä. Liukasteaine luo aidon tunteen ja antaa voimakkaan liukuominaisuuden. Sen värittömät ja mauttomat valmistusaineet takaavat luonnollisen nautinnon.



#### Satisfyer Men -liukasteaineen käyttö

Käytännöllisten pienten pullojen ansiosta aineen annostus on helppoa. Levitä maapähkinän kokoinen määrä liukasteainetta peniksen päälle ja myös hieman seksileluksi. Levitä liukasteaine erektiossa olevan peniksen päälle tasaisesti ja liu'u pehmeästi masturbaattorin sisään.

Levitä liukasteainetta sormien avulla riittävä määrä penikseen myös yhdynnän aikana tai erektiossa olevan peniksen päällä olevalle kondomille sekä kumppanille. On suositeltavaa pestä kädet huolellisesti ennen aineen käyttöä ja sen jälkeen. Kun käytät ainetta kondomin kanssa, tutustu ehdottomasti ensin kondomin käyttöohjeisiin.



#### Satisfyer Men -liukasteaineen puhdistaminen

Satisfyer Men -sarjan liukasteaineet voidaan puhdistaa vedellä täysin ilman jäämiä iholta, limakalvoilta ja seksilelusta. Hygieenisistä syistä seksilelu kannattaa puhdistaa jokaisen käytön jälkeen. Satisfyer Men Disinfectant Spray soveltuu täydellisesti tähän käyttötarkoitukseen.

#### Lisäneuvoja yhdynnän aikana tapahtuvaan käyttöön

##### Raskaudenehkäisy ja tartuntasuoja

Satisfyer Men -liukasteaineet eivät ehkäise raskautta, ne eivät sisällä siittiöitä tuhoavia aineita eivätkä suoja tartunnoilta.

#### Jos toiveenasi on vauva

Gynekologit suosittelevat käyttämään liukasteainetta säästeliäästi tai välttämään sen käyttöä varmuuden vuoksi kokonaan, sillä se saattaa vaikeuttaa hedelmöitymistä.

#### Lisätietoa yliherkkyydestä

Kun etsit tietoa yliherkkyydestä, esim. allergiaa aiheuttavista aineista, tutustu tuotemerkintöjen ainesosiin "Ingredients (INCI):" ennen käyttöä. Hävitä tuote ohjeiden mukaisesti ja ota tarvittaessa yhteys lääkäriin, mikäli käytön yhteydessä esiintyy ihoärsytystä.



#### Ainesosat

Vesi, glyseriini, hydroksietyyliselluloosa, fenoksisietanoli, allantoiini, bentsoehappo, mentoli, aromi

#### Valmistaja



Amor-Gummiwaren GmbH  
August-Rost-Str. 4  
99310 Arndtstadt, Saksa



CE 0197