

Satisfyer

Lietošanas instrukcija Satisfyer – Gentle Warming lubrikants

Satisfyer lubrikanti

Satisfyer lubrikanti ir izstrādājumi lietošanai uz ādas. To recepte ir bez eļļas un taukvielām un tie pārliecina ar izcilām ilgstošas iedarbības slīdes īpašībām.

Satisfyer lubrikanti ir radīti uz ūdens bāzes. Tas nozīmē, ka tos iespējams vienkārši pilnībā nomazgāt ar ūdeni un tie nerada lipošu sajūtu uz ādas. Tie ir ideāli piemēroti lietošanai ar visiem Satisfyer izstrādājumiem, bet tos iespējams lietot arī ar visām citām sekša rotāļlietām vai dzimumaktu laikā.

Šādi lubrikanti darbojas

Lubrikanti parada lietošanu ar tavu Satisfyer vienkāršu un bez berzes. Silikona uzlika maigi slīd pār tavām intīmajām vietām un šādi nodrošina tev ideālu novietojumu maksimālai baudas gūšanai. Pateicoties receptei bez krāsas, garšas un smaržas, tava uzmanība netiks novērsta no būtiskāk un šādi tu pilnībā varēsi koncentrēties sevis apmierināšanai.



Satisfyer lubrikantu pielietojums

Praktiskā pudelīte nodrošina tev vieglu dozēšanu. Uzpilini nedaudz lubrikanta uz sava klitora un vēl nedaudz uz Satisfyer silikona uzlikas. Sadali lubrikantu uz vēlamajām kermenē vietām.

Arī dzimumaktam pietiek uzklāt lubrikantu uz kermenē daļas vai arī uz uzbudināta peņa uzritināta prezervatīva, kā arī sadalīt lubrikantu ar pirkstiem. Ieteicams pirms un pēc lietošanas rūpīgi nomazgāt rokas.

Lietojot ar prezervatīvu, noteiku ievērojiet norādes prezervatīva lietošanas instrukcijā.



Satisfyer lubrikantu notīrišana

Satisfyer sērijas lubrikantus varat pilnībā nomazgāt ar ūdeni - neaikarīgi no tā, vai no ādas, glotādām vai savas sekša rotāļietas. Higiēnas nolūkos nomazgā savu ierīci pirms un pēc jebkuras lietošanas. Tam īpaši ir piemērots Satisfyer Disinfectant Spray.

Citas norādes par lietošanu dzimummakta laikā

Izsargāšanas no grūtniecības un aizsardzība pret infekcijām

Satisfyer lubrikanti nav līdzekļi aizsardzībai pret grūtniecību, tajos nav spermicīdu un tie nenodrošina aizsardzību pret infekcijām.

Vēloties ieņemt bērnu

Ginekologi iesaka, ja vēlaties ieņemt bērnu, lietojiet lubrikantu tikai ļoti maz vai drošības nolūkos pilnībā pārtrauciet tā lietošanu, jo tas varētu apgrūtināt bērna ieņemšanu.

Citas norādes nepanesamības gadījumā

Meklējot nepanesamību, piem., alerģiju izraisošas vielas, pirms lietošanas meklējiet informāciju izstrādājuma markējuma sadalā „Ingredients (INCI)”. Ja jums rodas ādas kairinājumi, lūdzu, notīriet izstrādājumu tā, kā aprakstīts iepriekš tekstā, un nepieciešamības gadījumā sazinieties ar ārstu.



Sastāvs

Glicerīns, ūdens, hidroksietilceluloze, nātrijs benzonāts, kālija sorbāts, citronskābe



EXCLUSIVE DISTRIBUTION BY:

Internetmarketing Bielefeld GmbH,
Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Germany

