

## Instrucciones de uso

### Satisfyer Men – Lubricante efecto cálido

#### Los lubricantes Satisfyer

Los lubricantes Satisfyer Men son productos médicos que se aplican sobre la piel. Tienen una fórmula libre de aceite y grasa y convienen por la materia prima seleccionada, los procesos de producción controlados y una inspección detallada. Los lubricantes han sido sometidos a controles de tolerancia cutánea y mucosal con resultados positivos y tienen una compatibilidad probada a los preservativos.

Todos los lubricantes de la serie Satisfyer Men cumplen las estrictas exigencias de la

«Directiva 93 / 42 CEE sobre productos medicinales» europea y la «Ley sobre productos medicinales» alemana.

Los lubricantes Satisfyer Men tiene base acuosa. Eso significa que se pueden lavar fácilmente con agua sin que queden restos y que no dejan ninguna sensación pegajosa sobre la piel. Son idóneos para ser usados con todos los productos Satisfyer Men, pero también se pueden usar con otros juguetes eróticos o durante el coito.

#### Así funcionan los lubricantes

Los lubricantes permiten el uso de tu Satisfyer Men con sencillez y sin roces. Funcionan como los lubricadores, que te permiten penetrar con rapidez la cueva blanda y disfrutar con tu juguete. El lubricante genera una sensación auténtica y un deslizamiento intenso. Su recete incolora e insípida permite un placer natural.



#### Uso de los lubricantes Satisfyer Men

La práctica botella te permite dosificar con facilidad. Pon una cantidad de lubricante del tamaño de un cacahuete sobre tu pene y un poco sobre el juguete. Distribuye el lubricante homogéneamente sobre el pene erecto y penetra con suavidad en el masturbador.

Durante el coito poner también suficiente lubricante sobre el preservativo extendido sobre el pene erecto y sobre el cuerpo de la otra persona y distribuirlo con los dedos. Se recomienda lavar a fondo las manos antes y después del uso.

Cuando se usa preservativo, se deben respetar también en todo momento las instrucciones de empleo del condón.



#### Eliminación del lubricante Satisfyer Men

Los lubricantes de la serie Satisfyer Men se pueden lavar con agua sin dejar rastro, no importa si están sobre la piel, mucosas o sobre el juguete erótico. Por motivos higiénicos, deberías lavar tu juguete antes y después de cada uso. Para ello es idóneo el Satisfyer Men Desinfectant Spray.

#### Otras indicaciones para el uso durante el coito

##### Anticoncepción y prevención de infecciones

Los lubricantes Satisfyer Men no son anticonceptivos, no contienen espermicidas ni protegen frente a infecciones.

#### Si desea tener hijos

Si desea tener hijos, los ginecólogos recomiendan utilizar lubricantes solo con moderación e incluso, para mayor seguridad, no utilizarlos, ya que pueden dificultar la concepción.

#### Otras indicaciones en caso de intolerancia

Si está buscando componentes que no tolera, p. ej. alérgenos, antes de utilizar el producto debería consultar el apartado «Ingredientes (INCI):» en los documentos de identificación del producto. En caso de irritación cutánea, retire el producto como se describe y consulte a su médico si es necesario.



#### Ingredientes

glicerina, agua, hidroxietilcelulosa, lactato sódico, benzoato sódico, alantoína, ácido láctico

#### Fabricante



Amor-Gummiwaren GmbH  
August-Rost-Str. 4  
99310 Arndtstadt, Alemania



CE 0197