

# Satisfyer

## Bruksanvisning Satisfyer – gentle warming-glidemiddel

### Satisfyer-glidemidlene

Satisfyer-glidemidlene er produkter beregnet på bruk på huden. De er laget uten bruk av olje og fett og overbeviser med sine gode glideegenskaper med langvarig effekt.

Satisfyer-glidemidlene er vannbaserte. Det betyr at de er enkle å vaske av med vann uten at rester blir værende igjen og at de ikke gir noen klebrig følelse mot huden. De er ideelt egnet for bruk sammen med alle satisfyer-produkter, men kan også brukes sammen med allslags andre leker eller under samleie.

### Slik virker glidemidlene

Glidemidlene gjør bruken sammen med din satisfyer enkel og jevn. Silikondelen til å legge oppå glir forsiktig over dine mest intime deler, slik at du kan posisjonere deg selv ideelt for en maksimal nytelse. Takket være oppskriften uten farger, smak og lukt, blir du ikke distraheret fra det vesentlige og kan konsentrere deg fullkomment om din egen tilfredsstillelse.



### Bruk av satisfyer-glidemidlene

Den praktiske lille flasken gjør det enkelt å posisjonere ut glidemiddel. Drypp litt glidemiddel på din klitoris og littegrann på satisfyers silikondel til å legge oppå klitoris. Fordel glidemidlet på de stedene på kroppen der du ønsker det.

Også under samleie må du bruke tilstrekkelig glidemiddel på kroppsdelen eller på kondomet som er rullet nedover den oppreiste penis og fordel midlet med fingrene. Det anbefales å vaske hendene grundig før og etter bruk.

Når du bruker kondom, er det viktig å følge instruksjonene i bruksanvisningen for kondomet.



### Fjerning av satisfyer-glidemidlene

Glidemidlene i satisfyer-serien kan vaskes helt av med vann, både fra hud, slimhinner og leketøy. Av hygieniske årsaker bør du før og hver bruk gjøre leketøyet rent. Satisfyer disinfectant spray er perfekt egnet til det.

### Andre råd ang. bruk under samleie

#### Prevensjon og beskyttelse mot infeksjoner

Satisfyer-glidemidlene er ikke prevensjonsmidler, inneholder ikke midler som dreper sædceller og gir ikke noen beskyttelse mot infeksjoner.

### Dersom dere ønsker å få barn

Gynekologer anbefaler at du bare bruker sparsomt med glidemidler dersom du vil ha barn eller for sikkerhets skyld kutter helt ut å bruke glidemidler, ettersom de kan gjøre det vanskeligere å få barn.

### Andre opplysninger ang. intoleranse

Når en er på utkikk etter stoffer som kan gi intoleranse, f.eks. allergifremkallende stoffer, bør en skaffe seg informasjon før bruk gjennom merking av produktet under «Ingredients (INCI)». Skulle huden bli irritert, så fjern produktet som beskrevet og rådfør deg evt. med en lege.



### Innholdsstoffer

Vann, glyserol, hydroksyetylcellulose, natriumbenzoat, kaliumsorbat, sitronsyre



### EKSKLUSIV DISTRIBUTJON GJENNOM:

Internetmarketing Bielefeld GmbH,  
Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Tyskland

