

Lietošanas instrukcija Satisfyer Men – Gentle Warming lubrikants

Satisfyer Men lubrikanti

Satisfyer Men lubrikanti ir medicīnas izstrādājumi lietošanai uz ādas. To recepte ir bez eļļas un taukvielām un tie pārlicina ar atlasītām sastāvdaļām, kontrolētu ražošanas procesu, kā arī apjomīgu pārbaudi. Lubrikantiem ir veiktas pozitīvas pārbaudes par panesamību uz ādas un gļotādas un tiem ir pierādāma panesamība uz prezervatīviem.

Visi Satisfyer Men sērijas lubrikanti atbilst stingrajām Eiropas Savienības direktīvas

„93 / 42 EEC par medicīnas ierīcēm” un Vācijas „Likuma par medicīnas produktiem” prasībām.

Satisfyer Men lubrikanti ir radīti uz ūdens bāzes. Tas nozīmē, ka tos iespējams vienkārši pilnībā nomazgāt ar ūdeni un tie nerada lipošu sajūtu uz ādas. Tie ir ideāli piemēroti lietošanai ar visiem Satisfyer Men izstrādājumiem, bet tos iespējams lietot arī ar citām seksa rotaļlietām vai dzimumaktu laikā.

Šādi lubrikanti darbojas

Lubrikanti parada lietošanu ar savu Satisfyer Men vienkāršu un bez berzes. Tie darbojas kā smērvielas, kas tev palīdz ātri iekļūt maigajā apvalkā un izbaudīt savas ierīces pielietojumu. Lubrikants nodrošina reālistisku sajūtu un intensīvu slīdamību. Vienlaikus recepte bez krāsām un garšas garantē dabīgu baudījumu.



Satisfyer Men lubrikantu pielietojums

Praktiskā pudelīte nodrošina tev vieglu dozēšanu. Uzklāj uz sava peņa lubrikantu zemesrieksta izmērā un nedaudz lubrikanta uz tavas ierīces. Sadali lubrikantu vienmērīgi uz sava uzbudinātā peņa un maigi ievadi to masturbatorā.

Arī dzimumaktam pietiek uzklāt lubrikantu uz peņa vai arī uz uzbudināta peņa uzritināta prezervatīva, kā arī partnera ķermeņa daļas un sadalīt lubrikantu ar pirkstiem. Ieteicams pirms un pēc lietošanas rūpīgi nomazgāt rokas.

Lietojot ar prezervatīvu, noteikti ievērojiet norādes prezervatīva lietošanas instrukcijā.



Satisfyer Men lubrikantu nofiršana

Satisfyer Men sērijas lubrikantus varat pilnībā nomazgāt ar ūdeni - neatkarīgi no tā, vai no ādas, gļotādām vai savas seksa rotaļlietas. Higiēnas nolūkos nomazgā savu ierīci pirms un pēc jebkuras lietošanas. Tam īpaši ir piemērots Satisfyer Men Disinfectant Spray.

Citas norādes par lietošanu dzimumakta laikā

Izsargāšanas no grūtniecības un aizsardzība pret infekcijām

Satisfyer Men lubrikanti nav līdzekļi aizsardzībai pret grūtniecību, tajos nav spermicīdu un tie nenodrošina aizsardzību pret infekcijām.

Vēlaties ieņemt bērnu

Ginekologi iesaka, ja vēlaties ieņemt bērnu, lietojiet lubrikantu tikai ļoti maz vai drošības nolūkos pilnībā pārtrauciet tā lietošanu, jo tas varētu apgrūtināt bērna ieņemšanu.

Citas norādes nepanesamības gadījumā

Meklējot nepanesamību, piem., alerģiju izraisošas vielas, pirms lietošanas meklējiet informāciju izstrādājuma marķējuma sadaļā „Ingredients (INCI):”. Ja jums rodas ādas kairinājumi, lūdzu, nofiriet izstrādājumu tā, kā aprakstīts iepriekš tekstā, un nepieciešamības gadījumā sazinieties ar ārstu.



Sastāvs

Glicerīns, ūdens, hidroksietilceluloze, nātrijs acetāts, nātrijs benzonāts, alantoīns, pienskābe



Ražotājs

Amor-Gummiwaren GmbH
August-Rost-Str. 4
99310 Arndtstadt, Germany



CE 0197