

Naudojimo instrukcija Lubrikantas Satisfyer Men – Warming

Lubrikantai Satisfyer Men

Satisfyer Men lubrikantai yra medicininiai produktai, skirti naudoti ant odos. Jų sudėtyje nėra aliejų ir riebalų ir jie įtikina rinktinėmis gamybos medžiagomis, kontroliuojamais gamybos procesais bei griežta kontrole. Lubrikantai patikrinti dėl tolerancijos ant odos ir gleivinės ir yra įrodytas jų suderinamumas su prezervatyvais.

Visi Satisfyer Men serijos lubrikantai atitinka griežtus Europos

„Direktivos 93 / 42 EEB dėl medicininių produktų“ ir Vokietijos „Medicinių produktų įstatymo“ reikalavimus.

Satisfyer Men lubrikantai vandens pagrindu. Tai reiškia, kad juos nesunkiai nuplausite vandeniu, jie nepalieka likučių ir ant odos nelieka lipnumo pojūčio. Jie puikiai tinka naudoti su visais Satisfyer Men produktais, tačiau juos galima naudoti ir su kitais žaisliukais ar lytinio akto metu.

Lubrikanto poveikis

Lubrikantas, jį naudojant naudojant su Satisfyer Men, palengvina procesą padeda išvengti trinties. Jie veikia kaip tepamoji medžiaga, leidžianti greitai įsiskverbti į minkštą apvaskalę ir tiesiog mėgautis savo žaisliuku. Lubrikantas suteikia tikrovišką pojūtį ir intensyvių slydimų. Jame nėra dažiklių ir skonį suteikiančių medžiagų, todėl jis sukuria natūralų malonumo pojūtį.



Satisfyer Men lubrikanto naudojimas

Praktiškas buteliukas leidžia patogiai dozuoti. Riešuto dydžio kiekį užtepkite ant savo penio ir truputį lubrikanto – ant savo žaisliuko. Lubrikantą tolygiai paskirstykite ant savo sujaudinto penio ir švelniai įsiskverbkite į masturbatorių.

Lytinio akto metu taip pat ant penio arba ant sujaudinto penio užmauto prezervatyvo bei ant atitinkamos partnerio kūno dalies užtepkite pakankamai lubrikanto ir išskirstykite jį pirštais. Prieš naudojant ir panaudojus, rekomenduojame gerai nusiplauti rankas.

Jei naudojate prezervatyvą, būtinai atsižvelkite į prezervatyvo naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus.



Satisfyer Men lubrikanto pašalinimas

Satisfyer Men serijos lubrikantus lengvai, nepalikdami likučių, nuplausite vandeniu, visai nesvarbu, ar nuo odos, ar iš gleivinės ar nuo savo žaisliuko. Dėl higieninių priežasčių žaisliuką reikėtų nuplauti prieš kiekvieną kartą naudojant ir kaskart panaudojus. Tam puikiai tiks Satisfyer Men Disinfectant Spray.

Kiti naudojimo nurodymai lytinio akto metu

Apsisaugojimas nuo nėštumo ir infekcijų

Satisfyer Men lubrikantai tai ne kontraceptinės priemonės, jie neturi spermicidinių veikliųjų medžiagų ir taip pat neapsaugo nuo infekcijų.

Nėštumo planavimas

Planuojant nėštumą, ginekologai rekomenduoja lubrikantus vartoti saikingai arba jų išvis atsisakyti, nes jie gali trukdyti apvaisinimui.

Kiti nurodymai dėl netoleravimo

Norėdami sužinoti apie netoleravimą, pvz., alergiją sukeliančias medžiagas, prieš naudodami peržiūrėkite ant produkto esančią žymą „Ingredients (INCI)“. Jei pastebėjote odos sudirgimą, produktą pašalinkite kaip nurodyta ir, jei reikia, pasikonsultuokite su gydytoju.



Sudedamosios medžiagos

Glicerinas, vanduo, hidroksietilo celiuliozė, natrio laktatas, natrio benzoatas, alantoinas, pieno rūgštis

Gamintojas



„Amor-Gummiwaren“ GmbH
August-Rost-Str. 4
99310 Arndtstadt, Vokietija



CE 0197