

# Satisfyer

## Gebrauchsanweisung Satisfyer – Gentle Warming Gleitmittel

### Die Satisfyer Gleitmittel

Die Satisfyer Gleitmittel sind Produkte zur Anwendung auf der Haut. Sie haben eine öl- und fettfreie Rezeptur und überzeugen mit hervorragender Gleiteigenschaft mit Langzeitwirkung.

Die Satisfyer Gleitmittel sind auf Wasserbasis. Das bedeutet, sie sind einfach und rückstandslos mit Wasser abwaschbar und erzeugen kein klebriges Gefühl auf der Haut. Sie sind ideal auf die Benutzung mit allen Satisfyer Produkten abgestimmt, können aber auch mit allen anderen Toys oder beim Geschlechtsverkehr verwendet werden.

### So wirken die Gleitmittel

Die Gleitmittel machen die Anwendung mit Deinem Satisfyer einfach und reibungslos. Der Silikon Aufsatz gleitet sanft über Deine intimsten Stellen und ermöglicht Dir so eine ideale Positionierung für den maximalen Genuss. Dank der farb-, geschmack- und geruchlosen Rezeptur wirst Du nicht vom Wesentlichen abgelenkt und kannst Dich vollkommen auf Deine Befriedigung konzentrieren.



### Anwendung der Satisfyer Gleitmittel

Das praktische Fläschchen ermöglicht Dir eine leichte Dosierung. Tropfe etwas Gleitmittel auf Deine Klitoris und ein wenig auf den Satisfyer Silikon Aufsatz. Verteile das Gleitmittel an den gewünschten Körperstellen.

Beim Geschlechtsverkehr ebenfalls genügend Gleitmittel auf das Körperteil oder auf das am erigierten Penis abgerollten Kondom auftragen und mit den Fingern verteilen. Empfehlenswert ist, sich vor und nach der Benutzung gründlich die Hände zu waschen.

Bei der Verwendung mit Kondom unbedingt die Hinweise der Gebrauchsanweisung des Kondoms beachten.



### Entfernung der Satisfyer Gleitmittel

Die Gleitmittel aus der Satisfyer Serie können rückstandslos mit Wasser abgewaschen werden, ganz gleich, ob von der Haut, den Schleimhäuten oder von Deinem Toy. Aus hygienischen Gründen solltest Du Dein Toy vor und nach jedem Gebrauch reinigen. Dafür ist das Satisfyer Disinfectant Spray perfekt geeignet.

### Sonstige Hinweise zur Verwendung beim Geschlechtsverkehr

#### Schwangerschaftsverhütung und Schutz vor Infektionen

Die Satisfyer Gleitmittel sind keine empfängnisverhütenden Mittel, enthalten keine spermiziden Wirkstoffe und bieten auch keinen Infektionsschutz.

### Bei Kinderwunsch

Gynäkologen empfehlen, Gleitmittel bei Kinderwunsch nur sparsam einzusetzen oder zur Sicherheit ganz wegzulassen, da sie die Empfängnis erschweren können.

### Sonstige Hinweise bei Unverträglichkeiten

Bei der Suche nach Unverträglichkeiten, z.B. allergieauslösenden Stoffen, sollte man sich vor der Anwendung in der Kennzeichnung des Produktes unter „Ingredients (INCI):“ informieren. Treten Hautirritationen auf, bitte das Produkt wie beschrieben entfernen und gegebenenfalls einen Arzt konsultieren.



### Inhaltsstoffe

Glycerin, Wasser, Hydroxyethylcellulose, Natriumbenzoat, Kaliumsorbat, Citronensäure



### EXCLUSIVE DISTRIBUTION BY:

Internetmarketing Bielefeld GmbH,  
Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Germany

